

UnbornHeart™ Doptone mobil-app – snabbguide för inspelning av fostrets hjärtljud

Installera en gratis applikation till din mobila enhet (iPhone, iPad, de flesta Android-telefoner och tabletter). Du finner Apple App Store och Google Plays nedladdningslänkar från adressen www.unbornheart.com.



Sätt batterier i dopplern och stoppningen på hörlurarna. Anslut hörlurarna till dopplern. Sätt hörlurarna i öronen.



Koppla kabeländan där det står 'DOPPLER' till dopplern. Koppla sedan kabeländan 'PHONE' till din mobila enhetens hörlursuttag.



Sätt den mobila enheten på flygläge. Starta UnbornHeart-applikationen. Applicera tillräckligt med ultraljudsgel på din bara mage. Slå på dopplern. Du är nu redo att övervaka babys hjärtljud med dopplern och spela in hjärtljudet med applikationen. Mer information finner du i applikationens "help" avsnitt.

Efter användning: stäng av dopplern och torka bort resterande ultraljudsgel från dopplern med en mjuk trasa. Koppla ur inspelningskabeln från dopplern och den mobila enheten. Aktivera normalläge i din mobila enhet.

UnbornHeart™-applikationen gör det underhållande och socialt att lyssna på din babys hjärtslag genom att spela in fostrets hjärtljudet och dela det med familj och vänner. Du kan dela det inspelade hjärtljudet per e-post, SMS, Facebook eller Twitter. Applikationen är inte avsedd för medicinsk användning utan endast för underhållning.